


“グッナイト” いびき対策枕 “goodnite” anti-snore pillow

スマートホン無しでも、枕を使用出来ます。

○ 枕を電源に繋ぎ、スイッチを ON にするだけ！

枕はいびきを検知したら、作動を始めます。
ただし、いびきの情報（大きさ、時間、比較、等）は記録されません。

いびき検知程度は、低、中、高の選定は出来ません。中で設定されています。
（多くの方は、スマートホンを使用しても中に設定されます。）

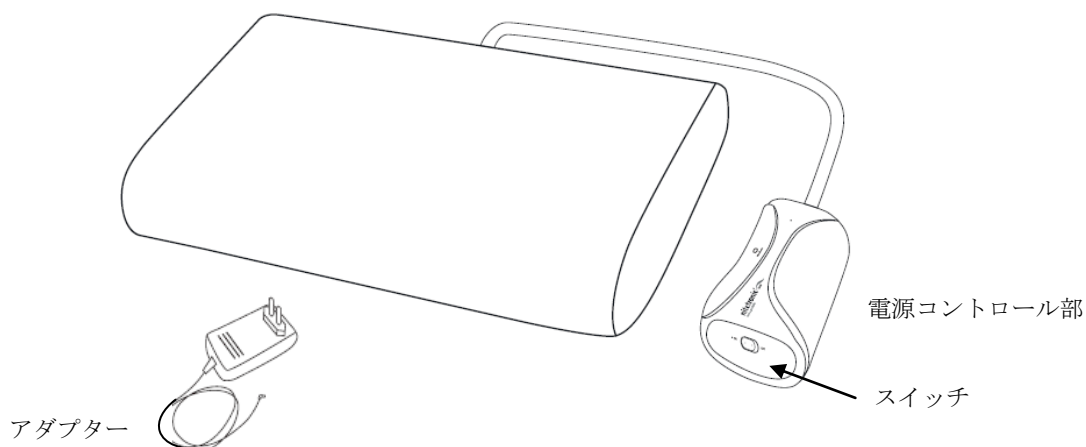

- 1) アダプターのプラグの一方を電源コントロール部のソケットに入れ、もう一方のプラグを家庭の AC ソケットに入れる。
- 2) 電源コントロール部のスイッチを ON にする。

以上で設定完了。 枕はいびきを検知すると、作動を開始します。